

## 1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK

Diese Hygienerichtlinie regelt die Reinigung von Desinfektionsmittel- und Flüssigseifenspendern für medizinisch genutzte Bereiche.

## 2 MITGELTENDE DOKUMENTE

- Reinigungs- und Desinfektionsplan des jeweiligen Bereiches/ Station
- Hygienerichtlinien der klinischen Abteilung für Krankenhaushygiene (<http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene>)

## 3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

AA	Arbeitsanweisung
AKH	Allgemeines Krankenhaus
e.h.	eigenhändig
HFK	Hygienefachkraft
IL	Institutsleitung
KHH	Klinisches Institut für Krankenhaushygiene
RL	Richtlinie
QB	Qualitätsbeauftragte/r

	Funktion	Name	Datum	Unterschrift
Erstellt	HFK	Susanne Gumpinger	31.01.2012	e.h.
Geprüft	QB	Alexander Blacky	31.01.2012	e.h.
Freigegeben	IL	Elisabeth Presterl	01.02.2012	e.h.

**Seifen- und Desinfektionsmittelspender**

gültig ab: 01.02.2012

Version 03

Seite 2 von 4

**4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG****4.1 Einleitung**

Desinfektionsmittel- und Flüssigseifenspender benötigen eine periodische Reinigung: Produktrückstände können die Dosierpumpe und den Auslauf verkleben, so dass nicht genügend Seife oder Desinfektionsmittel abgegeben wird oder diese sogar nicht direkt auf die Hände, sondern seitlich aus der Öffnung und damit auf die Kleider oder ins Gesicht spritzen. Besonders in unzugänglichen Teilen des Pumpmechanismus kann es bei Seifenspendern zu einer Besiedlung mit Keimen und in der Folge zu einer Abgabe keimhaltiger Flüssigseife kommen. Auch Verunreinigungen und Schmutz-Inkrustationen an Außenflächen sind zu vermeiden.

Eine **maschinelle Reinigung** ist grundsätzlich dem manuellen Reinigungsverfahren vorzuziehen.

**4.2 Periodische maschinelle Reinigung****Wann:**

- generell vierteljährlich
- laut bereichsspezifischen Desinfektionsplan monatlich (z.B. Intensivstationen, EGR, OP`s, Apotheke, ect.)
- im Rahmen der Stationswartung
- bei Umstellung auf ein anderes Produkt

**Wie:**

- Aufbereitung mittels Instrumentenwaschmaschine oder Geschirrspüler (Herstellerangaben beachten, ob und wie die Spender maschinell aufbereitbar sind)
- Flasche aus dem Spender nehmen
- Haube nach oben herausschieben (durch Drücken der Verriegelungszunge)
- Spenderflasche und Dosierpumpe herausnehmen
- Haube und Dosierspender vor der maschinellen Aufbereitung von Produkteresten durch Spülen mit heißem Wasser befreien

**Seifen- und Desinfektionsmittelspender**

gültig ab: 01.02.2012

Version 03

Seite 3 von 4

**4.3 Laufende manuelle Reinigung****Wann:**

- bei jedem Flaschenwechsel

**Wie:**

- Flasche aus dem Spender nehmen
- Spender und Dosierpumpe mit einem alkoholischen Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizieren. Nicht trocken wischen!
- Neue Flasche einhängen und Produkt durchpumpen

**4.4 Periodische manuelle Reinigung****Wann:**

- generell vierteljährlich
- laut bereichsspezifischen Desinfektionsplan monatlich (z.B. Intensivstationen, EGR, OP's, Apotheke, ect.)
- im Rahmen der Stationswartung
- bei Umstellung auf ein anderes Produkt

**Wie:**

- Flasche aus dem Spender nehmen
- Haube nach oben herausschieben (durch Drücken der Verriegelungszunge)
- Spender und Dosierpumpe herausnehmen
- Haube gründlich mit heißem Wasser reinigen
- Hinteres, angeschraubtes Spenderteil mit einem alkoholischen Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizieren
- Spender und Dosierpumpe mit einem alkoholischen Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizieren. Nicht trocken wischen!
- Einwegbecher mit Reinigungsmittellösung oder heißem Leitungswasser füllen (Nicht zu verwenden sind ätzende (chlorhaltige oder hochalkalische) Reiniger oder Scheuermittel)
- Dosierpumpe gründlich mit heißem Wasser durchspülen und von Produktresten reinigen
- Wasserrückstände sind durch mehrmaliges Pumpen zu entfernen
- Spender und Dosierpumpe trocknen lassen
- Aufbereitete Dosierpumpe einsetzen und Haube wieder aufschieben
- Neue Flasche einhängen und Produkt durchpumpen

**Seifen- und Desinfektionsmittelspender**

gültig ab: 01.02.2012

Version 03

Seite 4 von 4

**4.5 Auffangschale**

- Auffangschale und Aufhängegerüst abnehmen
- Auffangschale und Aufhängegerüst mit heißem Wasser spülen, von Produktresten befreien und trocknen lassen
- Wischdesinfektion mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel. Nicht trocken wischen!
- Aufhängegerüst über den Spender schieben und einhängen
- Auffangschale einlegen

**DESINFEKTIONSVERFAHREN UND –MASSNAHMEN**

**Zum Thema „Desinfektionsmittel- und Seifenspender“  
Siehe in der Hygienemappe des AKH Wien:**

[Desinfektionsplan für Klinische Bereiche](#)

**5 ÄNDERUNGEN**

Datum	Version	Änderung
01.10.2008	01	Erstellung, erste Freigabe
11.08.2010	02	Neues Layout; Änderung des Reinigungsintervalls
31.01.2012	03	Genauere Ausführung bzgl. des Reinigungsintervalls